

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
TESTAGEM DE LARINGOSCÓPIO E LÂMINAS





SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



TESTAGEM DE LARINGOSCÓPIO E LÂMINAS

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite
COREN: 468752
Lilian Fernanda Henriques Rabelo
COREN: 559921
Atualizado: SETEMBRO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1.DEFINIÇÃO

É um procedimento de suporte que avalia diariamente a funcionalidade do equipamento de laringoscopia que é utilizado para visualização de estruturas das vias aéreas superiores.

2. OBJETIVO

Assegurar o correto funcionamento do laringoscópio.

3. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA TESTAGEM

Equipe de Enfermagem e Médicos.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- 01 Cabo Laringoscópio
- 02 Pilhas médias comuns
- Lâminas curvas e retas vários tamanhos
- 01 Par de luvas de procedimento

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Higienizar as mãos;
- Calçar luvas de procedimento;
- Verificar a presença de duas peças do laringoscópio (lâminas e cabos);
- Certificar o correto posicionamento das pilhas no compartimento do cabo do
- Encaixar firmemente a lâmina do laringoscópio ao cabo (figura 1);
- Certificar se a luz que está na lâmina acenda ao encaixá-la no cabo;
- Observar a intensidade da luz emitida pela lâmpada da lâmina;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos;
- Registrar a realização do teste;
- Manter o ambiente em ordem;
- Repetir o procedimento diariamente.



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



TESTAGEM DE LARINGOSCÓPIO E LÂMINAS

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite
COREN: 468752
Lilian Fernanda Henriques Rabelo
COREN: 559921
Atualizado: SETEMBRO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

6. AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADE

Durante o teste de funcionamento do laringoscópio, se a luz não acender ou estiver fraca, confira o contato ou troque as pilhas no cabo, se o problema persistir registre e comunique a equipe de manutenção.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2ª ed, 2016.

SMELTZER S.C, BARE B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012, vol I e II. 2.