

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO



UPAE- SERRA TALHADA



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Fávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1. OBJETIVOS

Organizar o processo de trabalho na área de esterelização de materiais instrumentais.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Higienização das mãos;
- Fazer a limpeza da autoclave com pano limpo e umedecido em água;
- Passar álcool a 70% em toda a superfície dos móveis e bancadas;
- Usar EPI's (jaleco, touca e luvas se necessário);
- Controlar o funcionamento da autoclave, registrando todos os parâmetros a cada ciclo de esterilização;
- Anotar a data da esterilização, validade e o número do lote;
- Montar a carga de acordo com as orientações básicas;
 - Utilizar os cestos de acordo com os tamanhos dos pacotes;
 - Colocar os pacotes na posição vertical dentro dos cestos;
 - Evitar que o material encoste nas paredes da câmara, deixando espaço entre os pacotes para permitir penetração do vapor
 - Posicionar os pacotes mais pesados na parte inferior;
- Colocar nas autoclaves os pacotes com os testes biológicos no primeiro ciclo diariamente;
- Entabrir a porta da autoclave ao final do ciclo de esterilização e aguardar 15 min, para retirar o material;
- Após o esfriamento dos pacotes, encaminhá-los ao setor responsável;
- Solicitar orientação de enfermeiros sempre que houver dúvidas na execução da atividade;
- Manter a área limpa e organizada.

3. FINALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

- Higienização das mãos;
- Realizar desinfecção do local que foi utilizado com pano umedecido em álcool a 70%;
- Controlar a quantidade de materiais a serem distribuídos conforme a demanda diária;
- Usar EPI's (jaleco e touca);
- Receber o material da área de esterilização e guardá-los após esfriamento no local adequado;
- Observar em cada pacote recebido pela área de esterilização:
 - Modificação ocorrida na coloração da fita teste, para autoclave a vapor;
 - Preenchimento do rótulo e integridade do pacote.
- Verificar diariamente se os pacotes estão dentro do prazo de validade de esterilização;
- Solicitar orientação de enfermeiros sempre que houver dúvidas na execução da atividade;
- Manter a área limpa e organizada.