

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

LIMPEZA DE AUTOCLAVE



UPAE- SERRA TALHADA



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



LIMPEZA DE AUTOCLAVE

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Fávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1. OBJETIVOS

Realizar limpeza da autoclave na central de material e esterilização, realizada pela equipe de Enfermagem.

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- EPI's: gorro, avental impermeável e luvas de látex;
- Balde com água e detergente líquido neutro;
- Pano úmido e pano seco;

3. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

- Higienização das mãos;
- EPI's;
- Desligar o aparelho das tomadas
- Esperar o resfriamento completo do aparelho;
- Lavar com água e sabão toda as superfícies internas e externas;
- Enxáguar muito bem com pano úmido, secar com pano seco;
- Higienizar as mãos;

4. OBSERVAÇÕES

- Manter o equipamento seco quando não estiver em uso;
- Verificar sempre o nível de água antes da nova autoclavagem, trocando a água a cada esterilização;
- Frequência: diariamente ou sempre que houver necessidade;
- Realizar a checagem uma vez ao mês;
- Registrar em impresso próprio a data, hora e nome do responsável pela limpeza do equipamento.

5. REFERÊNCIAS

1) Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Comissão de Controle de Infecção. Subcomissão de Qualificações de Esterilização em Autoclaves. **Manual de Qualificação de Esterilização em Autoclaves. Ribeirão Preto, 2009.**